



Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

hysan[®] Hyaluronspray

Natriumhyaluronat 0,04 %

Zur lang anhaltenden Befeuchtung der Nasenschleimhaut.

Isotonische, sterile Lösung ohne Konservierungsmittel

Was ist hysan[®] Hyaluronspray?

hysan[®] Hyaluronspray ist eine sterile Lösung zum Einsprühen in die Nase. Die Lösung enthält Natriumhyaluronat, einen natürlichen Stoff, der in vielen Körperregionen zu finden ist. Daneben enthält die Lösung noch Natriumchlorid, einen Phosphatpuffer und Wasser. Die Zusammensetzung wurde so angepasst, dass sie den natürlichen Gegebenheiten auf der Nasenschleimhaut besonders gut entspricht.

Eine Flasche enthält 10 ml Lösung; dies entspricht ca. 70 Sprühstößen.

Wozu dient hysan[®] Hyaluronspray?

Dieses Nasenspray dient der Befeuchtung und verbesserten Reinigung der Nasenschleimhaut und bewirkt somit eine Erleichterung der Nasenatmung. Auch bei Schnupfen empfiehlt sich eine Anwendung als unterstützende Maßnahme. Die spezielle Zusammensetzung der Lösung auf Basis natürlicher Substanzen lässt dieses Präparat hierfür besonders geeignet erscheinen.

Wann sollte man hysan[®] Hyaluronspray anwenden?

Es kommt häufig vor, dass die Nase aufgrund besonderer Umstände bzw. Gegebenheiten ihre natürliche Feuchtigkeit verliert und „austrocknet“. Hierzu zählen nicht nur trockene Raumluft, Rauch, Staub, Wind oder Kälte, sondern auch als Folge eines Schnupfens kann es zu dem beschriebenen Beschwerdebild kommen. Es stellt sich hierbei das von vielen Menschen als unangenehm empfundene Gefühl der „trockenen Nase“ ein; durch die fehlende Feuchtigkeit wird aber auch die natürliche Reinigungsfunktion der Nasenschleimhaut ungünstig beeinflusst. Die Verwendung von hysan[®] Hyaluronspray hilft in diesen Fällen, die Nasenschleimhaut wieder anzufeuchten. Die ungehinderte Nasenatmung sowie die Reinigung der Nase wird erleichtert.

Was ist das Besondere an hysan[®] Hyaluronspray?

hysan[®] Hyaluronspray enthält eine natürliche Substanz, Hyaluronsäure. Diese Substanz hat zwei Eigenschaften, die sie zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut besonders geeignet machen: sie haftet sehr gut auf Schleimhäuten und bildet einen lang anhaltenden Schutzfilm. Darüber hinaus besitzt Hyaluronsäure ein hohes Wasserbindungsvermögen, oder einfacher ausgedrückt, sie ist „feuchtigkeitsbindend“.


hysan[®] Hyaluronspray enthält kein Konservierungsmittel und kein Treibgas. Da auch Hyaluronsäure eine natürliche, körpereigene Substanz ist, wird ein unnötiges Allergierisiko vermieden.

Welche Personen sollten hysan[®] Hyaluronspray nicht anwenden?

Bitte wenden Sie hysan[®] Hyaluronspray nicht an, wenn Sie Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Juckreiz, Rötungen) feststellen. Im Allgemeinen verschwinden solche Symptome rasch nach Beendigung der Anwendung.

Wie wendet man hysan[®] Hyaluronspray an?

Verwenden Sie hysan[®] Hyaluronspray nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war.

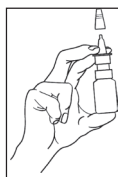

Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen.

Pumpe bis zum Austritt der Lösung betätigen (in der Regel 1–2mal).

Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

Die Sprühöffnung in das Nasenloch einführen und einmal pumpen, dabei leicht einatmen. Je nach Bedarf mehrmals täglich 1–2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen. Aus hygienischen Gründen bitte den Nasenadapter nach jeder Anwendung abwischen und mit der Schutzkappe verschließen.

Hinweis zur Anwendung:

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von eventuellen Infektionsübertragungen sollte jedes Spray nur von einer Person benutzt werden. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich auch, die Sprühöffnung nach Gebrauch abzuwischen und trocken zu halten.

Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Für den Fall einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Nasenspray oder Nasentropfen sollte ein zeitlicher Abstand von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. hysan[®] Hyaluronspray sollte dann immer zuletzt verabreicht werden.





Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie unsicher sind, ob und wie Sie mehrere Präparate zur Anwendung in der Nase kombinieren können.

Aufgrund seiner Konservierungsmittelfreiheit ist hysan® Hyaluronspray auch bei lang dauernder Anwendung besonders gut verträglich. Sie können es deshalb bedenkenlos auch über einen längeren Zeitraum benutzen.

hysan® Hyaluronspray kann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse sowohl bei Kindern als auch bei schwangeren und stillenden Frauen angewandt werden.

Wie oft und wie lange kann man hysan® Hyaluronspray anwenden?

Üblicherweise werden von hysan® Hyaluronspray dreimal täglich je 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch verabreicht, es kann aber auch öfters angewandt werden. Es bestehen keine Beschränkungen in der Anwendungsdauer.

Wie sollte man hysan® Hyaluronspray lagern?

hysan® Hyaluronspray sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt werden und nach Ablauf des Verfalldatums (📅) nicht mehr verwendet werden.

Bewahren Sie hysan® Hyaluronspray außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Notieren Sie das Datum des Anbruchs auf der Verpackung und bewahren Sie diese auf.

Stand der Information:

Januar 2015

Hersteller (🏭):

URSAPHARM, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken

Vertrieb Deutschland:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße,
D-66129 Saarbrücken
Tel.: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88
E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Vertrieb Österreich:

URSAPHARM Ges.m.b.H.,
A-3400 Klosterneuburg
Tel.: +43 676/842 799 100, Fax: +43 125 330 339 113,
E-Mail: info@ursapharm.at

Weitere Informationen zu hysan® Hyaluronspray

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Die Beeinträchtigung der Nasenatmung ist ein häufig auftretendes Problem.

Das in hysan® Hyaluronspray enthaltene Natriumhyaluronat ist ein natürlicher Stoff mit besonders positiven Eigenschaften. hysan® Hyaluronspray bildet einen angenehmen und lang haftenden Schutzfilm auf der Oberfläche der Schleimhaut, der nicht so rasch abgespült werden kann.

hysan® Hyaluronspray bietet gegenüber den herkömmlichen Salzwassersprays den Vorteil, dass man es nicht so häufig anwenden muss, um eine hohe und gleichmäßige Befeuchtung der empfindlichen Nasenschleimhaut zu erzielen.

hysan® Hyaluronspray befeuchtet, pflegt und unterstützt die Selbstreinigung der Nase. Aufgrund der besonderen Ventiltechnik des Systems enthält hysan® Hyaluronspray keine Konservierungsmittel, die oft allergische Reaktionen auslösen und die empfindliche Nasenschleimhaut reizen können. Der Spraymechanismus des Dosiersystems funktioniert rein mechanisch. Das Präparat enthält kein Treibgas.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig!
Wir freuen uns, per Post, Fax (Nr. +49 6805/92 92 222)
oder via www.ursapharm.info/hysan_hyaluronspray
von Ihnen zu hören.

