



Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen.

hysan[®] Salinspray hypertone Meersalzlösung (entspr. 2,7 % Meersalz)

Zur natürlichen Abschwellung der Nasenschleimhaut.
10 ml hypertone Lösung ohne Konservierungsmittel

Was ist hysan[®] Salinspray?

hysan[®] Salinspray ist eine hypertone Meersalzlösung zum Einsprühen in die Nase. Hyperton heißt, dass der Salzgehalt von hysan[®] Salinspray höher ist, als er normalerweise in den Zellen und Flüssigkeiten des Körpers vorherrscht.

Neben Meersalz enthält hysan[®] Salinspray lediglich gereinigtes Wasser.

Eine Flasche enthält 10 ml Lösung.

Wozu dient hysan[®] Salinspray?

hysan[®] Salinspray dient der natürlichen Abschwellung der Nasenschleimhaut.

hysan[®] Salinspray wirkt zweifach: Zunächst bewirkt es eine Befeuchtung der Nasenschleimhaut, ein Effekt der unmittelbar nach der Anwendung spürbar wird. Außerdem entzieht die hohe Salzkonzentration in hysan[®] Salinspray in der Folge der Nasenschleimhaut überschüssige Flüssigkeit. Dies ist insbesondere erwünscht bei entzündlichen Schwellungen der Nase, wie sie bei Erkältungsinfekten auftreten. In Folge der Abschwellung ist ein freies Durchatmen wieder möglich.

Die Befeuchtung mit hypertoner Meersalzlösung und der Entzug von überschüssiger Gewebsflüssigkeit führen darüber hinaus zu einer Verflüssigung von zähem Sekret. Somit wird der Heilungsprozess bei Nasen- und Nasennebenhöhleninfekten auf natürliche Weise unterstützt.

Wann sollte man hysan[®] Salinspray anwenden?

hysan[®] Salinspray eignet sich zur natürlichen Abschwellung der Nasenschleimhaut.

Insbesondere in Folge eines Schnupfens oder grippalen Infektes kommt es zu einer Anschwellung der Schleimhäute von Nase und Nasennebenhöhlen, so dass ein freies Durchatmen und der Abtransport zäh sitzenden Sekrets kaum mehr möglich sind. hysan[®] Salinspray unterstützt die Nasenschleimhaut in ihrer natürlichen Funktion, indem es zu einer Abschwellung der entzündeten Schleimhaut sowie einer Verflüssigung des zähem Sekrets beiträgt.

Die Anwendung von hysan[®] Salinspray kann dazu beitragen, die Verwendung von anderen abschwellenden Nasensprays (sogenannte Alpha-Sympathomimetika) zu reduzieren.

Was ist das Besondere an hysan[®] Salinspray?

hysan[®] Salinspray ist eine reine Meersalzlösung. Die heilsamen Effekte von Salz, insbesondere bei Atemwegsinfekten, sind seit Jahrhunderten beschrieben. Hohe Salzkonzentrationen in der Atemluft, wie sie in unmittelbarer Meeresnähe oder in Salinen herrschen, werden bis heute erfolgreich therapeutisch genutzt. hysan[®] Salinspray nutzt diese bekannten Eigenschaften, indem es lokal – am Ort der entzündlichen Vorgänge in der Nase – eine hohe Salzkonzentration erzeugt. Abschwellung und Reinigung der Nase führen schnell zu einer Besserung der Beschwerden.

hysan[®] Salinspray enthält kein Konservierungsmittel und kein Treibgas.

Welche Personen sollten hysan[®] Salinspray nicht anwenden?

Bitte wenden Sie hysan[®] Salinspray nicht an, wenn Sie Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Juckreiz, Rötungen) feststellen. Im Allgemeinen verschwinden solche Symptome rasch nach Beendigung der Anwendung. hysan[®] Salinspray soll nicht bei Kindern unter 1 Jahr angewendet werden.





Wie wendet man hysan® Salinspray an?

Verwenden Sie hysan® Salinspray nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war.



Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen.

Pumpe bis zum Austritt der Lösung betätigen (in der Regel 1-2mal). Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

Die Sprühöffnung in das Nasenloch einführen und einmal pumpen, dabei leicht einatmen. Je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen. Aus hygienischen Gründen bitte den Nasenadapter nach jeder Anwendung abwischen und mit der Schutzkappe verschließen.

Hinweis zur Anwendung:

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von eventuellen Infektionsübertragungen sollte jedes Spray nur von einer Person benutzt werden. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich auch, die Sprühöffnung nach Gebrauch abzuwischen und trocken zu halten.

Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Für den Fall einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Nasenspray oder Nasentropfen sollte ein zeitlicher Abstand von mindestens 30 Minuten eingehalten werden.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie unsicher sind, ob und wie Sie mehrere Präparate zur Anwendung in der Nase kombinieren können.

Aufgrund seiner Konservierungsmittelfreiheit ist hysan® Salinspray auch bei lang dauernder Anwendung besonders gut verträglich. Sie können es deshalb bedenkenlos auch über einen längeren Zeitraum benutzen.

hysan® Salinspray kann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse auch bei Kindern, die älter als 1 Jahr sind, und bei schwangeren und stillenden Frauen angewandt werden.

Wie oft und wie lange kann man hysan® Salinspray anwenden?

Üblicherweise werden von hysan® Salinspray dreimal täglich je 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch verabreicht, es kann aber auch öfters angewendet werden. Es bestehen keine Beschränkungen in der Anwendungsdauer.

Wie sollte man hysan® Salinspray lagern?

hysan® Salinspray sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt werden und nach Ablauf des Verfalldatums (☞) nicht mehr verwendet werden.

Bewahren Sie hysan® Salinspray außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Notieren Sie das Datum des Anbruchs auf der Faltschachtel.

Stand der Information:

Juli 2013

Hersteller (☞):

URSAPHARM, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken

Vertrieb Deutschland:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken
Tel.: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88
E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Vertrieb Österreich:

URSAPHARM Ges.m.b.H., A-3400 Klosterneuburg
Tel.: +43 676/842 799 100, Fax: +43 125 330 339 113,
E-Mail: info@ursapharm.at



Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig!
Wir freuen uns, per Post, Fax (Nr. +49 6805/92 92 222)
oder via www.ursapharm.info/hysan_Salinspray
oder von Ihnen zu hören.

