

## Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig, weil sie Ihnen helfen wird,  
Vita POS® richtig anzuwenden.

# Vita POS®

## Retinolpalmitat

Zur Verbesserung des Tränenfilms und Schutz der Augenoberfläche  
Vitamin A-haltige Augensalbe ohne Konservierungsmittel

### Was ist Vita POS®?

Vita POS® ist eine sterile, Vitamin A-haltige Augensalbe zur Anwendung am Auge.

### Zusammensetzung:

1 g Vita POS® enthält 250 I.E. Retinolpalmitat (Vitamin A), dickflüssiges Paraffin, dünnflüssiges Paraffin, Wollwachs und weiße Vaseline.

Eine Tube enthält 5 g.

### Wozu braucht man Vita POS®?

Vita POS® verbessert den Tränenfilm und schützt die Augenoberfläche.

Vita POS® ist eine besonders weiche und geschmeidige Augensalbe, die sich sehr gut auf der Augenoberfläche verteilt. Das darin enthaltene Vitamin A ist ein natürlicher Bestandteil des Tränenfilms, der die gute Verträglichkeit der Salbe unterstützt und dafür sorgt, dass sich die Salbe gut mit den vorhandenen Tränen vermischt. Dadurch wird das Gefühl brennende, trockene oder müde Augen zu haben, gelindert. Die Augenlider gleiten problemlos über Horn- und Bindehaut.

### Wann sollte man Vita POS® anwenden?

Unter Einfluss von Klimaanlagen, z. B. im Auto oder Flugzeug, Wind, Kälte, starker Sonneneinstrahlung, schlechter Luft oder Zigarettenrauch kommt es häufig zu brennenden oder juckenden Augen mit einem Trockenheits- oder Fremdkörpergefühl.

Auch durch konzentriertes Sehen, z. B. bei langer Bildschirmarbeit, Fernsehen oder nächtlichen Autofahrten können diese Beschwerden auftreten. Werden außerdem Kontaktlinsen getragen, ist das Risiko dieser Befindlichkeitsstörungen umso größer.

Vita POS® lindert diese Symptome und bildet einen angenehmen, lang haftenden Schutzfilm auf den Augen. Die fettreiche Konsistenz der Salbe führt zu einer leichten Beeinträchtigung der Sehleistung. Deshalb sollte Vita POS® vor allem vor dem Zubettgehen angewandt werden. Etwaige Beschwerden beim ersten morgendlichen Öffnen der Augen lassen sich mit Vita POS® verhindern.

### Wie verwendet man Vita POS®?

Augensalben sollten grundsätzlich so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tubenspitze mit Auge oder Gesichtshaut vermieden wird.

Verwenden Sie Vita POS® nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war (☉). Schrauben Sie die Verschlusskappe der Tube ab.



Legen Sie den Kopf leicht zurück, ziehen Sie das Unterlid mit dem Finger einer Hand etwas vom Auge ab.



Halten Sie mit der anderen Hand die Tube in aufrechter Position über das Auge. Bringen Sie durch leichten Druck auf die Tube einen kleinen Salbenstrang in den Bindehautsack ein.



Schließen Sie langsam die Augenlider.

Nach Gebrauch soll die Tube wieder sorgfältig verschlossen werden.



## Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Wenn Sie VitA POS® tagsüber anwenden, werden Sie wegen der fettreichen Salbenkonsistenz vorübergehend nicht völlig klar sehen können. Sie sollten dann nicht Auto fahren, aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, Maschinen bedienen oder Arbeiten ohne sicheren Halt ausführen. VitA POS® sollte nicht gleichzeitig mit Augenarzneimitteln angewendet werden. In diesen Fällen verabreichen Sie VitA POS® erst ca. 30 Minuten nach Anwendung der Augenarzneimittel. Bitte entnehmen Sie die Augensalbe durch sanftes Ausdrücken der Tube ohne Knicken und Aufrollen.

VitA POS® kann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse auch bei Kindern, schwangeren und stillenden Frauen angewandt werden.

Mit dem Inhalt einer Tube VitA POS® sollte immer dieselbe Person behandelt werden.

In sehr seltenen Einzelfällen wurde von Überempfindlichkeitsreaktionen der Augen (z. B. Rötung, Brennen, Juckreiz, Tränenfluss) berichtet, die nach Absetzen von VitA POS® direkt abklingen.

## Wie oft und wie lange sollte man VitA POS® anwenden?

Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach Ihren individuellen Beschwerden und Lebensgewohnheiten. VitA POS® kann die Anwendung von befeuchtenden Augentropfen ergänzen und wird dann einmal täglich vor dem Zubettgehen angewandt. Bei ausgeprägtem Trockenheitsgefühl der Augen wird VitA POS® üblicherweise dreimal täglich angewandt. Wenn Sie den Eindruck haben, VitA POS® öfter zu benötigen, fragen Sie einen Augenarzt um Rat. Es besteht keine Beschränkung in der Anwendungsdauer.

## Wann sollte man VitA POS® nicht anwenden?

Wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile bekannt ist, sollte man VitA POS® nicht anwenden. VitA POS® darf nicht während des Tragens von Kontaktlinsen verabreicht werden. VitA POS® sollte nicht unmittelbar nach operativen Eingriffen am Auge oder bei akuten Augenverletzungen angewendet werden, da hierzu keine klinischen Studien vorliegen.

## Welche Hinweise zur Aufbewahrung von VitA POS® sind zu beachten?

Nicht über 25 °C lagern (  25 °C ).

VitA POS® ist nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

VitA POS® sollte nach Ablauf des Verfalldatums (  ) nicht verwendet werden.

## Bewahren Sie VitA POS® außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### Stand der Information:

März 2018

### Hersteller ( ):

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken

### Vertrieb Deutschland:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken

Tel.: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88

E-Mail: [info@ursapharm.de](mailto:info@ursapharm.de), [www.ursapharm.de](http://www.ursapharm.de)

### Vertrieb Österreich:

URSAPHARM Ges.m.b.H., A-3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 676/842 799 100, Fax: +43 125 330 339 113,

E-Mail: [info@ursapharm.at](mailto:info@ursapharm.at)

 0344 Medizinprodukt

STERILE A

Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig! Wir freuen uns, per Post, Fax (Nr. +49 6805/9292222) oder via [www.ursapharm.info/vitapos](http://www.ursapharm.info/vitapos) von Ihnen zu hören.